

# 簡易フェイスシールドの作り方

新型コロナウイルスへの感染の広がりが継続している現在、  
医療従事者を守るための保護具である、  
マスク、ガウン、フェイスシールド等の供給が追いつかず、  
日本全国で大きな問題となっています。

そのような問題の解決に少しでもお役に立てるよう、  
近隣のホームセンターや手芸屋、百均ショップなどで  
**容易に入手できる材料で、**  
**誰でも手軽に作れることを目指したフェイスシールドです。**

歯科、眼科、耳鼻咽喉科など、患者さんの顔に近づいて診察しなくては  
ならない医療従事者などでお使いいただければと思います。  
また、額の部分が布テープなので、汗が目にも落ちるのも防いでくれます。

**制作時間は5分未満、**  
**道具はハサミと定規だけで作れます。**

大阪大学 安全衛生管理部

Version.1.0

2020/04/17

## 材 料

1. バッグの持ち手等に使うアクリルテープ25mm幅、厚みは2mm程度のもの  
必要量：30cm
2. 25mm幅の織ゴム  
必要量：25cm
3. 手芸（布）用強力両面テープ30mm幅
4. 手芸用仮止めクリップ（フィッシュクリップでも可）  
必要量：2個
5. 透明なプラスチック板A4サイズ（ある程度腰があるものなら何でも）  
百円均一のカードケースハードタイプを解体したり、OHPシートなど  
必要量：1枚



## 作成手順

1. アクリルテープを30cm、織ゴムを25cmの長さに切る
2. 両面テープを25mm程度の長さに切り、織ゴムの両端につける
3. 両面テープの保護シールをはがしてアクリルテープをつけ、ヘッドバンドを作る
4. ヘッドバンドのゴム部分を後ろにして頭に装着し、こめかみの位置を確認
5. 仮止めクリップをこめかみの位置に両面テープでとりつける
6. A4サイズの透明プラ板を横長の向きでクリップで止めれば完成

※ プラ板は百均のカードケースハードタイプが使いやすいです。  
ただ、ハサミで解体するのが少々面倒です。  
少し柔らかく揺れますが、OHPシートでも代用可能です。


※ 両面テープは洗濯可能なタイプを選びましょう。

※ 仮止めクリップはフィッシュクリップでも代用可能です。





1. アクリルテープを30cm、織ゴムを25cmの長さに切る



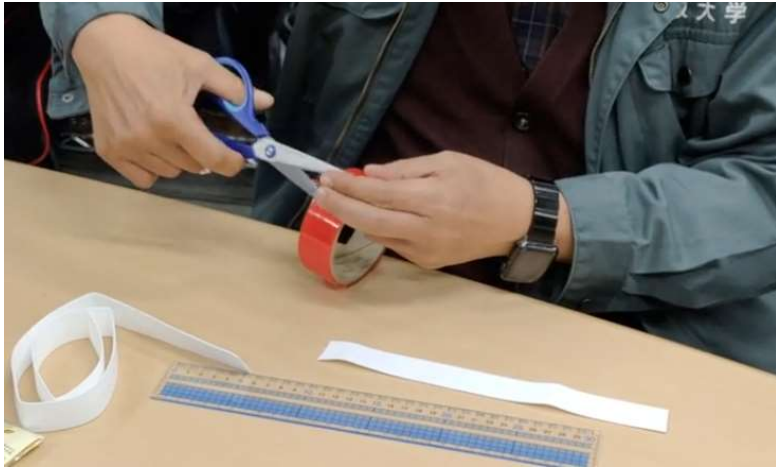

2. 両面テープを25mm程度の長さに切り、織ゴムの両端につける

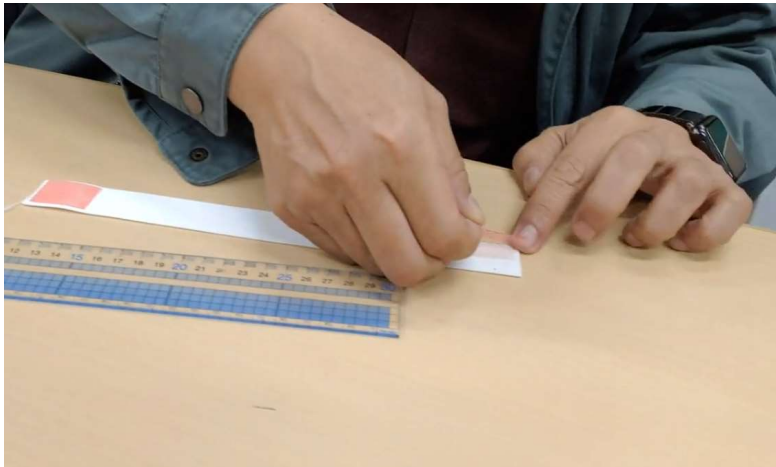


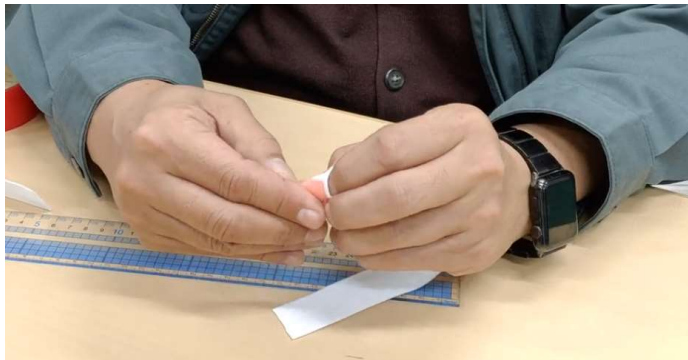


3. 両面テープの保護シールをはがして  
アクリルテープをつけ、ヘッドバンドを作る




4. ヘッドバンドのゴム部分を後ろにして頭に装着し、こめかみの位置を確認

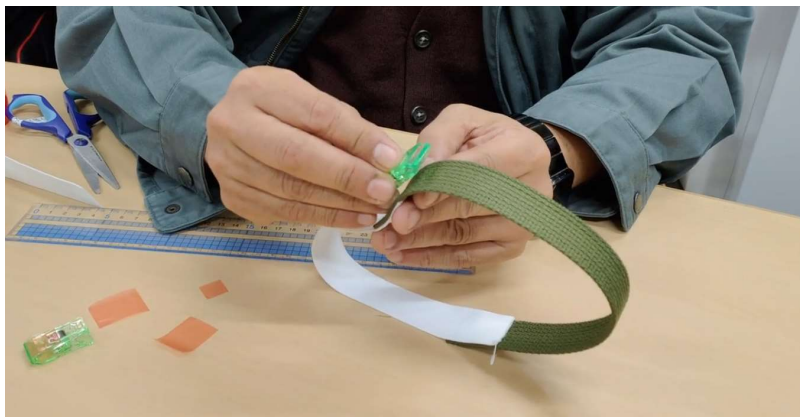

5. 仮止めクリップをこめかみの位置に  
両面テープでとりつける

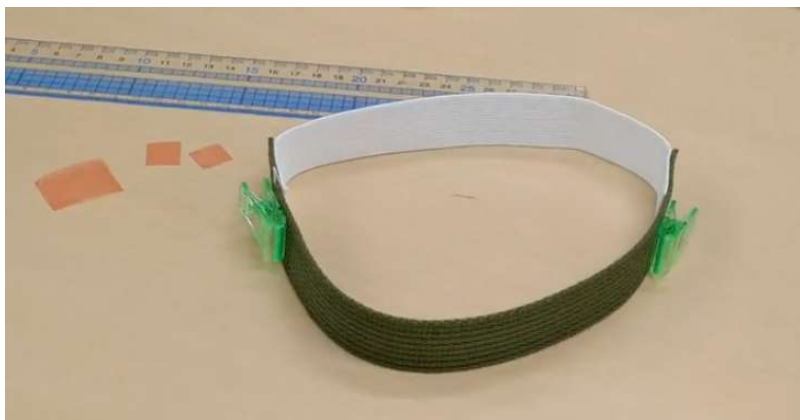



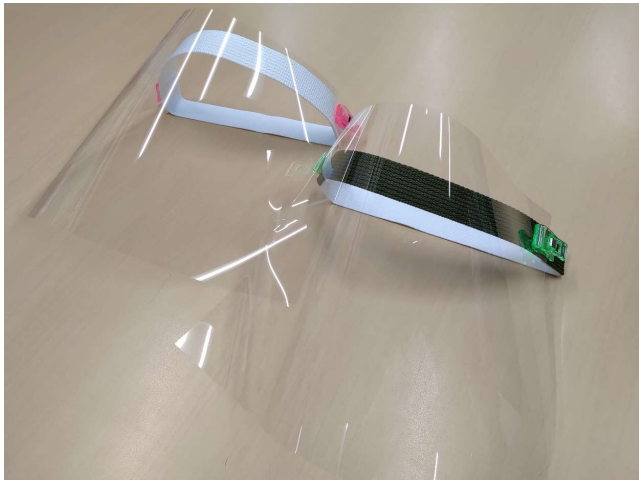

6. A4サイズの透明プラ板を  
横長の向きでクリップで止めれば完成



大阪大学  
OSAKA UNIVERSITY